

Istruzioni per il Prelievo del Campione

Il Campione può essere costituito da capelli (preferibilmente), peli ascellari o pubici.

Per ottenere un corretto campione i capelli dovrebbero essere non trattati, ad esempio con tinture o colpi di sole. Se i capelli sono stati chimicamente trattati aspettare finché non rinascano almeno due centimetri di nuovi capelli. I capelli dovrebbero essere senza gel, olii o creme prima di essere prelevati.

I capelli devono essere presi da 4-5 piccole aree della regione occipitale.

Usare le forbici e tagliarli il più vicino possibile allo scalpo, prendere pochissimi capelli per ogni area affinché non si noti nessuna zona vuota sullo scalpo. Se i capelli sono più lunghi di 2 centimetri tagliarli e conservare solo la parte più vicina al cuoio capelluto.



Per ottenere la necessaria quantità di capelli usare la bilancia pesa capelli. Stampate questo modulo (basta cliccare sull'immagine della stampante in basso a destra e **stampare su cartoncino**), ritagliate la bilancia, piegate le alette verso il basso e posate il campione nel piccolo box quadrato fino a quando l'area A non tocca la superficie del piano d'appoggio. Se avete difficoltà a stampare la bilancia la quantità di capelli necessaria per il test è quella che riempie un cucchiaino da cucina. Imbustate il campione in una piccola busta di carta (ad es. Busta per i biglietti da visita) scrivete il nome, il cognome e la data e spedite unitamente al modulo con le vostre informazioni.

